

acapella®

DM, DH & CHOICE Vibratory PEP Therapy System

acapella® es un innovador dispositivo de higiene bronquial que ayuda a desplazar las secreciones pulmonares.

El tratamiento de presión espiratoria positiva (PEP) se emplea para movilizar secreciones. Se ha determinado que los dispositivos para PEP aumentan la independencia de los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas debido a que el tratamiento se puede administrar sin ayuda y cuando a estos les resulta más cómodo.

acapella® combina las ventajas de la terapia de PEP y las vibraciones aplicadas a las vías respiratorias con el fin de desplazar las secreciones pulmonares. Se puede emplear en prácticamente cualquier posición, lo que permite que los pacientes se muevan con libertad y se sienten, permanezcan de pie o se tumben.

Mejora el aclaramiento de las secreciones, se tolera mejor que la fisioterapia respiratoria (FTR), las sesiones duran casi la mitad de tiempo que las sesiones de FTR convencional* y **facilita la apertura de las vías respiratorias de los pacientes con enfermedades pulmonares con problemas de las secreciones como EPOC, asma y fibrosis quística.**

Las unidades codificadas por colores (verde para el flujo alto y azul para el flujo bajo) permiten personalizar el tratamiento de cada paciente de acuerdo con sus necesidades clínicas. Puede ajustar la frecuencia y la resistencia al flujo de acapella® con solo girar un selector de ajuste.



Ventajas Del Producto

- Permite la inhalación y la exhalación sin retirarlo de la boca.
- Prolonga el flujo espiratorio para aumentar la eliminación de secreciones.
- Permite su uso con la boquilla o la mascarilla conectadas.
- Permite su uso con un nebulizador en línea cuando se fija con un adaptador de salida.
- Se adapta a la capacidad pulmonar de prácticamente cualquier paciente.
- Permite su uso en cualquier posición: el paciente se puede sentar, estar de pie o inclinarse.
- Fácil limpieza.

acapella®

DM, DH & CHOICE Vibratory PEP Therapy System

Características del sistema vibratorio de tratamiento de PEP acapella® DM y DH:



• Codificación por colores:

DM (Azul) : Recomendado para pacientes con capacidad de mantener un flujo espiratorio < 15 lpm durante 3 segundos.

DH (Verde) : Recomendado para pacientes con capacidad de mantener un flujo espiratorio \geq 15 lpm durante 3 segundos.

CHOICE : Recomendado para pacientes con capacidad de mantener un flujo espiratorio \geq 10 lpm durante 3 segundos acapella® Choice se compone de cuatro piezas sencillas de limpiar que resisten la esterilización en autoclave, el hervido y la limpieza en lavavajillas.

- Válvula inspiratoria.
- DE de 22 mm en el extremo ambiente.
- DE de 22 mm en el extremo del paciente.
- Selector de resistencia espiratoria.
- Mecanismo de balancín patentado.




acapella®

DM, DH & CHOICE Vibratory PEP Therapy System

Instrucciones de Uso:

Cuando use este dispositivo por primera vez, asegúrese de ajustar el disco al nivel correcto. Esto determinará la cantidad de PEP (presión o resistencia). El disco está ubicado en la base, en el lado opuesto a la boquilla. Su proveedor de asistencia médica puede ajustar el disco por usted. Si no, ajústelo según el #1.

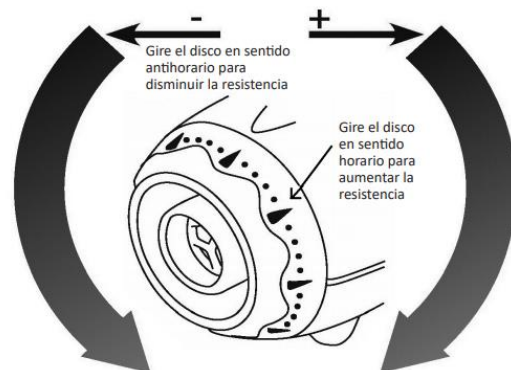

1. Gire el disco al extremo del dispositivo en sentido antihorario (hacia la izquierda), o hacia el signo menos (-) hasta su nivel más bajo.
2. Para aumentar el nivel de la presión, gire el disco en sentido horario (hacia la derecha) y hacia el signo +. (Es posible que sea necesario realizar ajustes para llegar al nivel apropiado).
3. Si usa un nebulizador con acapella®, conecte el nebulizador al extremo del dispositivo en este momento.
4. Ponga la boquilla en la boca, manteniendo un cierre hermético cuando inhale. Si en vez de eso usa una máscara, asegúrese de ponerla de forma segura sobre la nariz y la boca para que no haya áreas de fugas alrededor de la máscara. No respire por su nariz mientras lo use. Si es necesario, use un clip nasal para ayudar a prevenir esto.
5. Siéntese recto en una posición cómoda a menos que su proveedor de asistencia médica le haya indicado otra cosa. Use una respiración diafragmática; intente relajarse.
6. Inspire lentamente un poco más que un respiro normal para usted. Intente inspirar una bocanada que sea 3/4 del respiro más hondo que le sea posible.
7. Manténgalo de 2 a 3 segundos. No quite el dispositivo.
8. Exhale tanto como pueda dentro del dispositivo de 3 a 4 segundos. Evite la fuerza excesiva cuando exhale. Es posible que sienta una vibración cuando exhale. Intente no toser en este momento. Nota: Si le es muy difícil exhalar de 3 a 4 segundos, y está botando el aire demasiado rápido, quizás necesite ajustar el disco de presión. Gire el disco en sentido horario hasta la siguiente marca o nivel. Esto aumentará la vibración y le permitirá exhalar más lentamente.
9. Después de exhalar, retire la boquilla y tosa con resoplido de 2 a 3 veces. Eso ayudará a sacar las secreciones.
10. Repita los pasos 4 al 9 entre 10 a 20 veces. Quizás necesite hacer eso varias veces al día según indique su proveedor de asistencia médica.

acapella®

DM, DH & CHOICE Vibratory PEP Therapy System

Mantenimiento y Limpieza:

Limpie acapella® de forma regular para evitar que se acumulen gérmenes que podrían causar infecciones. Nunca lo ponga en el lavavajillas. No lo hierva ni use lejía para limpiarlo.

Cada día:

1. Retire la boquilla.
2. Sumerja la boquilla y el cuerpo del dispositivo en agua tibia y jabonosa durante varios minutos.
3. Enjuague y seque.
4. Coloque el dispositivo acapella® de lado o con el extremo de la boca hacia abajo. Es importante asegurar que el agua se drene completamente.

Desinfecte su acapella® una vez por semana usando uno de los siguientes métodos:

- a. Sumerja la boquilla y el cuerpo en alcohol isopropílico al 70% durante 5 minutos. Enjuague, drene y seque. O 2.
- b. Ponga en remojo ambas partes en peróxido de hidrógeno al 3% durante 30 minutos. Enjuague, drene y seque. Cuando ambos estén completamente secos, conecte la boquilla al cuerpo para ser usado.

SOLO PARA ACAPELLA CHOICE:

Limpie y desinfecte de la misma forma descrita anteriormente. acapella® Choice se compone de cuatro piezas sencillas de limpiar que resisten la esterilización en autoclave, el hervido y la limpieza en lavavajillas.

Ebullición: Hierva el dispositivo en agua hasta 100°C hasta 2 veces al día por 5 minutos.

Autoclave: La temperatura no debe pasar los 136 °C por un máximo de 30 ciclos.

Lavavajillas Automático: Se recomienda colocar los componentes en la parte superior del lavavajillas.

Glutaraldehídos: Puede utilizar este sistema de esterilización



- NO UTILIZAR CLORO O LEJÍA PARA SU LIMPIEZA
- NO SE PUEDE COLOCAR EL DISPOSITIVO EN EL MICROONDAS.

acapella®

DM, DH & CHOICE Vibratory PEP Therapy System

Clasificación según Terapia de presión espiratoria positiva (PEP) requerida



acapella® DH System

- ≥ 15 L/min de flujo espiratorio
- Ideal para la mayoría de los pacientes
- Puede colocar un pequeño nebulizador
- Fácil de limpiar y enjuagar con agua tibia jabonosa
- Mejor opción para uso de corto tiempo



acapella® DM System

- < 15 L/min de flujo espiratorio
- Ideal para pacientes geriátricos o pediátricos
- Puede colocar un pequeño nebulizador
- Fácil de limpiar y enjuagar con agua tibia jabonosa
- Mejor opción para uso de corto tiempo



acapella® CHOICE System

- ≥ 10 L/min de flujo espiratorio
- Ideal para la mayoría de los pacientes crónicos
- Puede colocar un pequeño nebulizador
- Fácil de limpiar, desarmable para esterilizar
- Mejor opción para uso a largo tiempo

Indicaciones de Uso:

- El tiempo de vida de acapella® es de hasta SEIS meses bajo el uso normal recomendado. Estos seis meses de uso se medirán a partir de la fecha que realizó el primer uso del dispositivo.
- **NO UTILIZAR SI ESTA DAÑADO O NO PRESENTA SU EMPAQUE ORIGINAL**
- **USO PARA UN SOLO PACIENTE**

Presentación y Empaque:

Empaque individual en bolsa plástica con abre fácil, en una de sus caras se visualiza el dispositivo y sus componentes e instructivo de uso en diferentes idiomas y en la otra cara indica:

- Nombre del dispositivo en idioma español.
- Número de referencia
- Marca
- Fabricante
- País de origen y de manufactura
- Número de Lote
- Fecha de fabricación
- Fecha de caducidad



55•2624•3210

55•4336•1668

direcciongigsa@genericosinyectables.com.mx
operaciones@genericosinyectables.com.mx
logistica@genericosinyectables.com.mx